

## MÁSCARAS MÉDICAS TIPO II

fabricadas na huiladesign



USO CLÍNICO

FICHA TÉCNICA  
agosto 2020



## INTRODUÇÃO

As máscaras cirúrgicas fabricadas pela Huiladesign, estão classificadas com a tipologia II, de alta filtração.

Estas máscaras têm o propósito de, sobretudo, proteger os profissionais de saúde, que em ambiente hospitalar, deverão estar apetrechados diariamente, com os EPI's mais adequados.

Os componentes destas máscaras são genuínos, como comprovam os testes laboratoriais, que a Huiladesign teve acesso.

As máscaras cirúrgicas Huiladesign evitam que profissionais de saúde e doentes contaminados com doenças infecciosas como Covid – 19, tuberculose entre outras, possam infectar outros e infectar o ambiente.

No contexto de pandemia pelo novo coronavírus SARS-COV 2, o grau de eficácia destas máscaras prende-se sobretudo com a alta retenção de gotículas - partículas densas - potencialmente contaminadas - projectadas pela fala, na expiração, espirros, e tosse.

# Máscaras médicas de uso clínico

Huiladesign

## Máscaras cirúrgicas tipo II de Alta Filtração

Marca	Huiladesign
Fabricante	Huiladesign
Origem	Angola, Huíla
Apresentação produto	Caixa com 50 máscaras cirúrgicas
Categoria	Dispositivo médico / EPI
Peso da caixa	185g
Dimensões da caixa	18,7 x 9,8 x 10cm
Cor máscaras	azul
Forma de ajuste no rosto	Elásticos soldados por ultrassom e clip nasal

Número de Camadas	3
1ª e 3ª camada	PP non woven fabric (TNT, polipropileno), testada sob critérios internacionais como ISO10993-10:2010
2ª camada	Melt Blown (filtro de alta qualidade e resistência)
BFE 2ª camada Melt Blown (Filtro) Eficácia de Filtração bacteriana	99,5%, testado em laboratório, sob critérios internacionais de qualidade como o YY 0469 - 2011 e harmonizados com a EN 14683
PFE – 2ª camada Meltblown (Filtro) Eficácia de filtração partículas	91,27%, testado em laboratório, sob critérios internacionais de qualidade como YY 0469 – 2011, harmonizados com EN 14683.
Tipo de utilização	Descartável, uso diário - entre 3 a 8 horas, tendo em conta a temperatura, humidade, concentração de substância contaminante.
Ambiente Hospitalar	Pelos profissionais de saúde, para evitar o contágio do ambiente dos pacientes; pelos pacientes infectados com doenças infecciosas como Covid – 19, tuberculose e outros.
Cirurgias / procedimentos	Para cirurgias / procedimentos médicos invasivos, sempre que a exposição a sangue e outros fluídos corporais do doente não representem risco para o profissional de saúde

Recomendações	Antes de usar a máscara, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Quando descartar a máscara, coloque-a em recipiente próprio e volte a higienizar as mãos. Durante o uso, evite tocar na máscara ou ajustá-la, sem que as mãos estejam devidamente higienizadas, para evitar a autocontaminação
Uso por crianças	A partir dos 8 anos, sob vigilância de adulto
Especificidades	Caso tenha alguma patologia respiratória consulte o seu médico, Asma, doença obstrutiva crónica, cancro pulmonar, bronquite crónica, e outras, podem ser impedimentos médicos para o uso da máscara. Pode substituir por solução alternativa como <u>viseira de protecção ocular</u> , abaixo do queixo

#### NOTAS:

1. Evite poluir o ambiente, descarte a máscara em local adequado
2. O uso da máscara não invalida o conjunto de normas de prevenção como distância social, higienização frequente das mãos e etiqueta respiratória.
3. Não utilize a máscara por mais tempo que o indicado
4. A máscara é para ser usada de forma a que fiquem tapados nariz e boca, sendo que o clip nasal se ajusta ao nariz, e a máscara deve ser também ajustada debaixo do queixo.
5. Esta máscara permite boa respirabilidade e conforto.